

ELLA Extractor

Extractor para Prótesis Esofágicas SX-ELLA



ELLA Extractor



Sistema de extracción simple y confiable

Recuperación atraumática de la prótesis

Permite la extracción de las prótesis que han migrado al estómago

Marcadores radiopacos



Descripción básica

Extractor para Prótesis Esofágicas SX-ELLA

Extractor ELLA está diseñado para la extracción de las prótesis esofágicas SX-ELLA:

- ☑ SX-ELLA Prótesis Esofágica - Flexella
- ☑ SX-ELLA Prótesis Esofágica - Flexella Plus
- ☑ SX-ELLA Prótesis Esofágica HV - HV Stent
- ☑ SX-ELLA Prótesis Esofágica HV - HV Stent Plus
- ☑ SX-ELLA Prótesis Danis - Prótesis Danis
- ☑ Prótesis Esofágica Danis Seal

Recomendaciones para la extracción:





- ☑ La prótesis Danis se debe extraer dentro de 7 días después de la implantación. La prótesis esofágica Danis Seal se debe extraer dentro de 14 días después de la implantación - después de ese período **no es recomendado el uso del Extractor**.
- ☑ La extracción de las prótesis totalmente recubiertas insertadas en las estenosis benignas, se debe realizar en 4 semanas después de la implantación de la prótesis.
- ☑ Extractor ELLA se puede usar también para la recuperación de prótesis que han migrado al estómago.

Características y beneficios

- ☑ **Captura atraumática de la prótesis** - la prótesis queda completamente recuperada en el sobretubo antes de la extracción; no ejerce maltrato a la pared esofágica y el procedimiento no deja cortes, peladuras ni raspaduras.
- ☑ **Excelente radiopacidad** - cable de acero inoxidable y marcadores radiopacos en el sobretubo - control fluoroscópico preciso.
- ☑ **Diseño único** - extracción segura de las prótesis, desde su posición original y aquellos que han migrado al estómago.
- ☑ **Manejo a través del canal de trabajo (TTS - Through The Scope)** - cable de extracción está diseñado para ser usado a través del canal de trabajo del endoscopio estándar (2.8 mm); lazada de recuperación de la prótesis es capturada con el gancho de detención, bajo visión directa.

Descripción adicional

Sobretubo de 9.4 mm (28 F) - 100 cm, con marcador radiopaco distal.
Cable de extracción de acero inoxidable de 2.6 mm / 150 cm, que consta de cable interno con el gancho de detención y vaina trenzada.

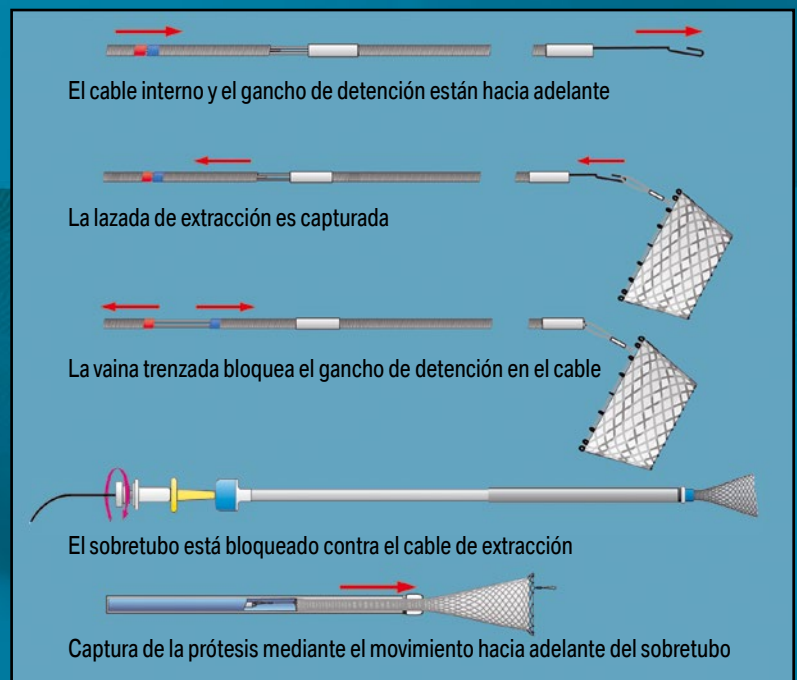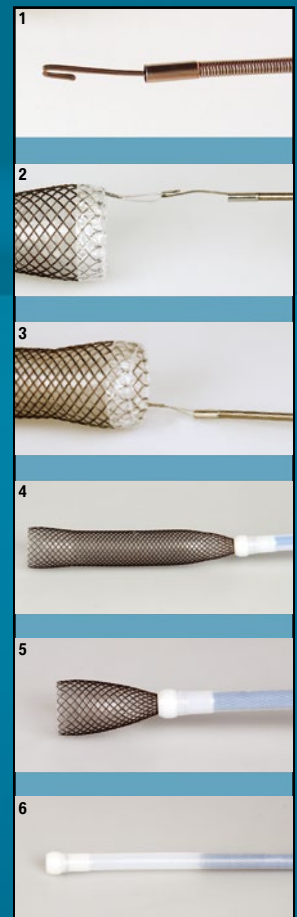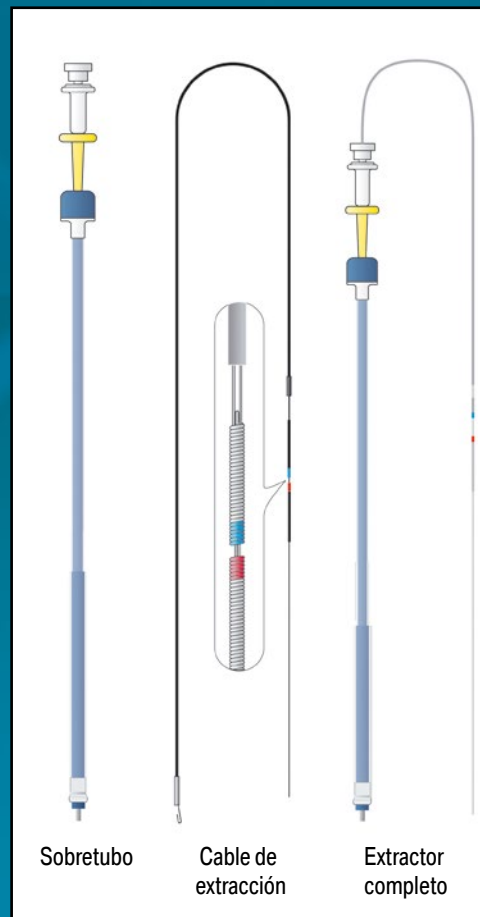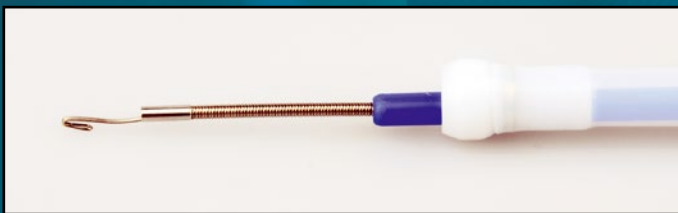

Medidas disponibles

REF No.	Cable de extracción		Sobretubo	
	Diámetro externo [mm]	Longitud [cm]	Longitud [cm]	Diámetro externo [F]
015-01-28-1000	2.6	150	100	28

Distribuidor:

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes, 500 06,
Hradec Kralove, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu